

# Flamigel®

## Metoda modernă de combatere a plăgilor

- Cicatrizează rapid
- Protejează împotriva infecțiilor
- Reduce durerea
- Sigur
- Se aplică ușor



### O soluție unică pentru toate plăgile

- **ARSURI**  
(provocate de: fricțiune, căldură, substanțe chimice, tratamente, laser, clismă)
  - **ARSURI SOLARE**
  - **PLĂGI**
  - **EXCORIATII**
- de la început până la sfârșit**

#### ARSURI

- ▶ Aplicați cu atenție Flamigel® direct pe zona afectată, fără masaj.

#### RANI DESCHISE

- ▶ Curățați rana cu apă curată sau ser fiziologic
- ▶ Uscăți rana cu atenție, folosind tifon curat (steril)
- ▶ Aplicați pe arsură un strat gros de Flamigel® (aprox. 5 mm)
- ▶ Aplicați compresă sterilă pe rană sau bandajați



In functie de tipul plagii se va aplica de la 1 pana la 4 ori pe zi

S.C. SANITECH S.R.L.  
ROMANIA, BUCURESTI, STRADA POPA TATU 59, AP.1, SECTOR1  
Tel: 004 021 311.01.00 - Fax: 004 021 311.00.88  
www.sanitech.ro

# Flamigel®



- **ARSURI**
- **ARSURI SOLARE**
- **TĂIETURI**
- **ZGÂRIETURI**

## Metoda modernă de combatere a rănilor

# Flamigel®

- COMPOZITIE UNICA
- ACTIUNE TRIPLA SPECIALIZATA
- REGENERARE TISULARA IMEDIATA


## ● COMPOZITIE INOVATOARE

Coloid hidroactiv + Arginină  
Sub formă de hidrogel

## ● ACTIUNE TRIPLA SPECIALIZATA

### ▶ CICATRIZEZA RAPID


Accelerează cicatrizarea reglând  
hidratarea plăgii

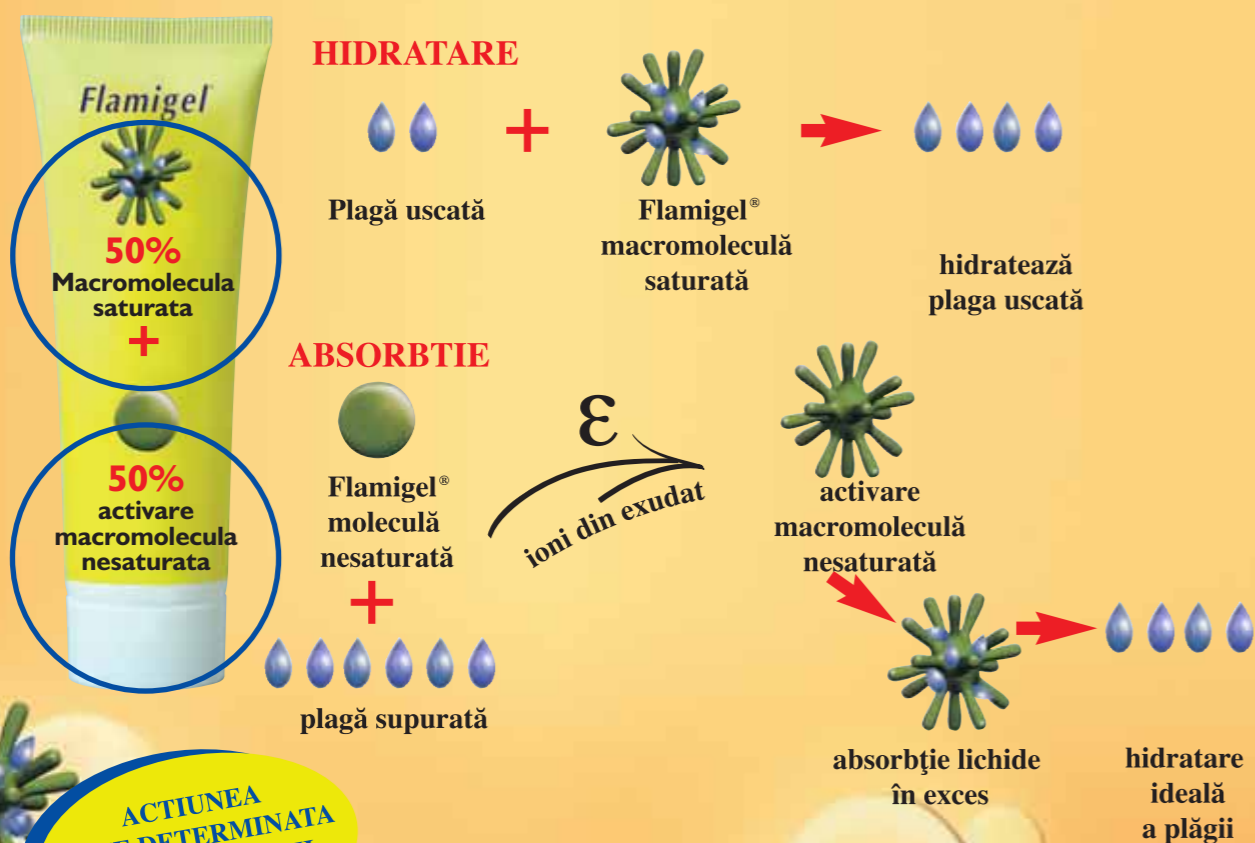


## ▶ PROTECTIE IMPOTRIVA INFECTIILOR

Acțiune antimicrobiană

- pH acid
- Inhibă glicoliza prin împiedicarea sintezei ATP-ului
- Inhibă captarea acidului aminobenzoic necesar metabolismului bacterian
- Reține și distruge microorganismele în structura gelului
- Nu permite migrarea microorganismelor înapoi în plagă

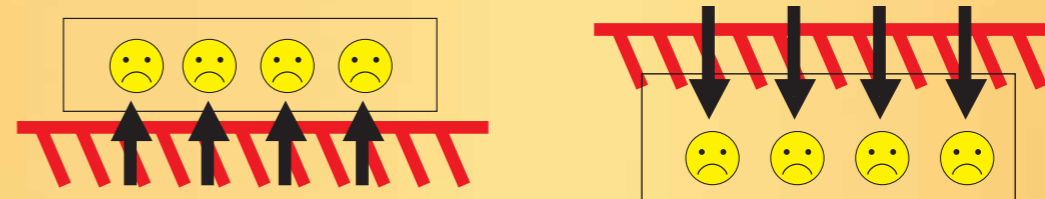

Studiu de control microbial "PET" (Eur. Ph. Requirements)

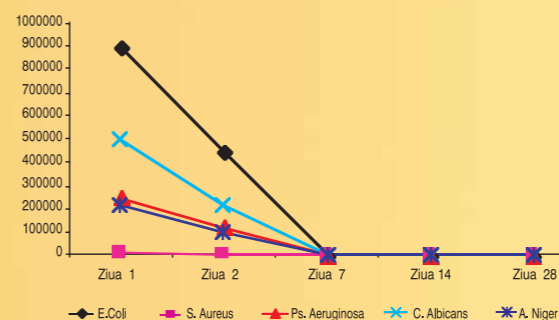

## ▶ CALMEAZA IMEDIAT DUREREA

Acțiune răcoritoare și  
calmantă a hidrogelului

### Cu siguranță

- Protejează împotriva infecțiilor și a suprainfecțiilor
- Se utilizează cu siguranță și pe plăgi deschise
- Sigur și în cure îndelungate

*Pentru orice tip de plagă*